



Ultradental

FICHA TÉCNICA

Versión: 1

Fecha: octubre 1 de 2018

Código: FT-GT-042

NOMBRE DEL PRODUCTO:

TEMPOSIL 2

REF:

VARIAS

NOMBRE GENERICO:

CEMENTO PROVISIONAL BASADO EN SILICONA DE ADICION

DATOS GENERALES:



PRESENTACION:

INTRO KIT: 2 jeringas de 5 ml, 15 puntas mezcladoras
REFILL PACK: 4 jeringas de 5 ml
INSTRUCCIONES DE USO

FABRICANTE:

COLTENE/ WHALEDENT AG
SUIZA

IMPORTADO POR:

ULTRADENTAL S.A.S.
COTA, CUNDINAMARCA,
COLOMBIA

REGISTRO SANITARIO:

INVIMA 2017DM-0000385-R1

FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:

Marzo 5 DE 2027

CLASIFICACION DE RIESGO:

Ila

TIPO DE DISPOSITIVO:

INVASIVO

VIDA UTIL:

2 años

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura de 4 a 23°C ± 5

DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:

COMPOSICION:

Polidimetil Siloxano , óxido de zinc y catalizadores

USOS:

- Cementado provisional de restauraciones provisionales
- Cementado provisional de restauraciones provisionales sobre pilares
- Cementado provisional de coronas y puentes definitivos
- Cementado provisional de coronas y puentes definitivos sobre pilares

CONTRAINDICACIONES:

Hasta el momento no se conoce ningún efecto secundario.
Alergia algún componente.

TIEMPOS CLINICOS:

- TIEMPO DE TRABAJO: ≤ 0:50 min
- TIEMPO DE FRAGUADO: ≥ 2:00 min

ADVERTENCIAS CONSIDERACIONES:

Y

- Utilice siempre guantes.
- Las secreciones cutáneas, los guantes de látex y las superficies contaminadas por guantes de látex pueden influir sobre el proceso de fraguado de las siliconas de fraguado por adición.
- El material y las preparaciones sólo deberían tocarse con guantes bien lavados y aclarados (lavarlos durante 15 s con solución jabonosa y aclararlos durante 15 s con agua corriente) o con guantes sin látex. Los preparados hemostáticos que contienen eugenol y determinados anestésicos también pueden impedir un fraguado completo.
- Las temperaturas elevadas aceleran el fraguado, mientras que las temperaturas bajas lo hacen más lento.

MODO DE EMPLEO:

VER INSTRUCCIONES DE USO

APROBADO POR:

NOMBRE:

PATRICIA RESTREPO OCHOA

CARGO:

DIRECTORA TECNICA