

		<b>FICHA TÉCNICA</b>			<b>Versión: 2</b>
					<b>Fecha: diciembre 1 de 2018</b>
					<b>Código: FT-GT-087</b>
<b>NOMBRE DEL PRODUCTO:</b>	<b>PULIDORES DIATECH SHAPEGUARD PREPULIDO COMPOSITE</b>	<b>REF:</b>	<b>60019878</b>	<b>NOMBRE GENERICO:</b>	<b>PULIDORES DE SILICONA PARA RESINA</b>
		<b>DATOS GENERALES:</b>			
		<b>PRESENTACION:</b>	<b>CAJA X 5</b>		
		<b>FABRICANTE:</b>	<b>COLTENE/ WHALEDENT AG SUIZA</b>		
		<b>IMPORTADO POR:</b>	<b>ULTRADENTAL S.A. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA</b>		
		<b>REGISTRO SANITARIO:</b>	<b>INVIMA 2017DM-0000677-R1</b>		
		<b>FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:</b>	<b>13 DE MARZO DE 2027</b>		
		<b>CLASIFICACION DE RIESGO:</b>	<b>I</b>		
		<b>TIPO DE DISPOSITIVO:</b>	<b>INVASIVO DE USO TRANSITORIO</b>		
		<b>VIDA UTIL:</b>	<b>NO APLICA</b>		
		<b>DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:</b>			
<b>COMPOSICION:</b>		<b>ACERO INOXIDABLE Y SILICONA</b>			
<b>USOS:</b>		<b>INSTRUMENTAL ROTATORIO PARA EL PULIDO DE RESINAS</b>			
<b>ADVERTENCIAS:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los ácidos potentes y las bases donde se insertan los pulidores pueden dañar el vástago de acero inoxidable.</li> <li>• Enjuagar los pulidores con agua destilada después de su tratamiento con soluciones de limpieza y desinfectantes.</li> <li>• Evitar las temperaturas &gt; 150 °C.</li> <li>• La temperatura del baño ultrasónico no debe superar los 42° C por la posible coagulación de las proteínas.</li> </ul>			
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN:</b>		<p><b><u>Limpieza manual:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solución limpiadora y desinfectante Durr Dental ID 212</li> <li>• Concentración: 2%</li> <li>• Tiempo de mantenimiento: 5 min.</li> </ul> <p><b><u>Limpieza con ultrasonidos:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durr Dental ID 212</li> <li>• Tipo de dispositivo: ultrasónico</li> <li>• Concentración: 2%</li> <li>• Tiempo de mantenimiento: 2 min.</li> </ul> <p><b><u>Limpieza automática:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Máquina de limpieza y desinfección Miele G 7883</li> <li>• Programa: SPECIAL 93 °C – 10'</li> <li>• Tiempo de mantenimiento: 10 min.</li> <li>• Detergente: Dr. Weigert – neodisher MediClean Dental</li> <li>• Aclarado: 3 min. a 75 °C con neodisher Z Dental</li> </ul> <p><b>NOTA: No utilizar limpiadores o desinfectantes corrosivos.</b></p> <p><b><u>Esterilización:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de mantenimiento ciclo completo: 5 min.</li> <li>• Temperatura de esterilización: 134 °C</li> <li>• Tiempo de secado: 10 min.</li> <li>• Valores límites de las sustancias contenidas para el agua de alimentación y el condensado del vapor.</li> </ul> <p>Ver documento: <b>Recomendaciones para la seguridad y la higiene de los pulidores de silicona</b></p>			
<b>APROBADO POR:</b>		<b>NOMBRE:</b>		<b>PATRICIA RESTREPO OCHOA</b>	
		<b>CARGO:</b>		<b>DIRECTORA TECNICA</b>	