



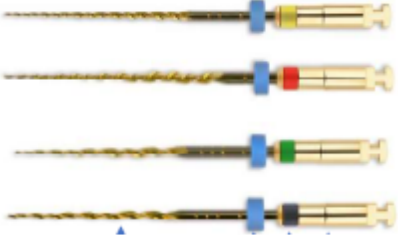



Ultradental

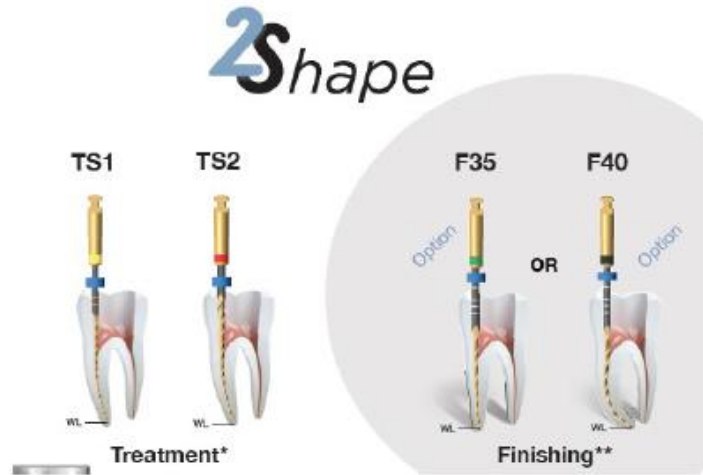
FICHA TÉCNICA

Versión: 0

Fecha: junio 1 de 2021

Código: FT-GT-105

NOMBRE DEL PRODUCTO:	2SHAPE MICRO-MEGA	REF:	VARIAS	NOMBRE GENERICO:	LIMAS ROTATORIAS NIQUEL TITANIO
			DATOS GENERALES:		
			PRESENTACION:	BLISTER X4 (surtido), X6 (de la misma referencia) LIMAS	
			FABRICANTES:	MICRO -MEGA S.A CON DOMICILIO EN FRANCIA	
			IMPORTADO POR:	ULTRADENTAL S.A.S. Cota, Cundinamarca	
			REGISTRO SANITARIO:	INVIMA 2020DM-0022170	
			FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:	05 DE OCTUBRE DE 2030	
			CLASIFICACION DE RIESGO:	IIa	
			TIPO DISPOSITIVO:	INVASIVO	
ALMACENAMIENTO	Almacene los productos en un ambiente seco, limpio y sin polvo.				
DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:					
COMPOSICION:		NIQUEL TITANIO La secuencia 2Shape está compuesta por los siguientes elementos: - una hoja mecanizada electropulida y termotrada de nitinol (NiTi); - un cuerpo de sujetadores niquelado y dorado; - un anillo de silicona de color (amarillo para TS1, rojo para TS2, verde para F35 y negro para F40) - un tapón de silicona azul cargado al 25% de bario.			
USO Y ESPECIFICACIÓN DE USO	Función normal Los instrumentos permiten realizar un tratamiento de conducto fácil y rápido. Los instrumentos 2Shape se utilizan con contra-ángulos endodónticos rotativos continuos. Velocidad de uso: entre 250 y 400 RPM. Torque recomendado TS1 y F40: 2 N.cm Torque recomendado TS2 y F35: 2,5 N.cm Los instrumentos 2Shape se utilizan con un recorrido de tres ondas progresivas hacia abajo y con un apoyo parietal de ascenso.				
LONGITUDES DISPONIBLES:	21 mm 25 mm 31 mm				
TAPER (CONICIDAD)	Lima No. 25 taper .04 Lima No. 25 taper .06 Lima No. 35 taper .06 Lima No. 40 taper .04				
Número de Lima	20, 25, 35, 40				
Tipo de vástago	Clásico 				
Especificaciones geométricas	Los instrumentos 2Shape tienen un taper de .04 y .06. Tienen un perfil de 3 hélices de sección asimétrica. Los instrumentos 2Shape están disponibles en vástago clásico (mango Ø 2,35) para su uso en contra-ángulos endodónticos.				
ESTERIL		La lima viene en un blíster estéril.			
ADVERTENCIAS:	No utilice agentes limpiadores o desinfectantes que contengan fenol, aldehído y composición alcalina.				

<p>Procedimiento de operación:</p>		
<p>Disposición Final de la Lima:</p>	<p>Después de su uso, los instrumentos deben colocarse en un recipiente seguro, utilizado para recoger los instrumentos cortantes o punzantes (como agujas o bisturí desechable)</p>	
<p>APROBADO POR:</p>	<p>NOMBRE:</p>	<p>PATRICIA RESTREPO OCHOA</p>
	<p>CARGO:</p>	<p>DIRECTORA TECNICA</p>