

**FICHA TÉCNICA**

Versión: 1

Fecha: noviembre 1 de 2018

Código: FT-GT-005

NOMBRE DEL PRODUCTO:

ENDO-FROST

REF:

240000

NOMBRE GENERICO:

ENDO-FROST**DATOS GENERALES:**

PRESENTACION:

Frasco x 200 ml

FABRICANTE:

COLTENE/ WHALEDENT GmbH
ALEMANIA

IMPORTADO POR:

ULTRADENTAL S.A.S.
COTA, CUNDINAMARCA,
COLOMBIA

REGISTRO SANITARIO:

INVIMA 2014DM-0002927-R1

FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:

26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLASIFICACION DE RIESGO:

I

TIPO DE DISPOSITIVO:

NO INVASIVO

VIDA UTIL:

5 Años

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura
de 4 a 23°C ± 5**DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:**

COMPOSICION:

PROPANO / BUTANO

USOS:

SPRAY REFRIGERANTE UTILIZADO PARA DIAGNOSTICAR LA VITALIDAD PULPAR DEL DIENTE.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia a algún componente del producto.

PRECAUCIONES:

TENER CIUDADO CON LOS TEJIDOS BUCALES ADYACENTES, YA QUE PUEDE PRODUCIR QUEMADURAS E IGUALMENTE PUEDE INFLUIR EN EL CORRECTO DIAGNOSTICO DEL DIENTE, DANDO UN FALSO POSITIVO.

NO APLICAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA DENTAL, SE DEBE APLICAR EL PRODUCTO A UNA MOTA DE ALGODÓN Y LUEGO SI COLOCAR LA MOTA AL DIENTE.

CARACTERISTICAS Y MODO DE EMPLEO:

Spray refrigerante:

- temperatura – 50°C
- Para congelar torundas y pequeños rollos de algodón y luego aplicar estas sobre la superficie dental, NUNCA se debe aplicar el Spray Endo-Frost directamente al diente.
- con boquillas de aplicación para una aplicación de gran precisión
- de olor neutro

APROBADO POR:

NOMBRE:

PATRICIA RESTREPO OCHOA

CARGO:

DIRECTORA TECNICA