



FICHA TÉCNICA

Versión: 2
Fecha: junio 1 de 2022
Código: FT-GT-009

NOMBRE DEL PRODUCTO:	ROEKO GELATAMP	REF:	Frasco x 20: 274002 Frasco x 50: 274007 Blíster x 20: 274008	NOMBRE GENERICO:	TAMPONES DE GELATINA
-----------------------------	-----------------------	-------------	--	-------------------------	-----------------------------

	DATOS GENERALES:	
	PRESENTACION:	Frasco X 20 ESPONJAS Frasco X 50 ESPONJAS Blíster x 20 ESPONJAS
	FABRICANTE:	ROEKO GmbH ALEMANIA
	IMPORTADO POR:	ULTRADENTAL S.A.S. COTA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA
	REGISTRO SANITARIO ACTUAL:	INVIMA 2022DM-0000614-R2
	FECHA VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO:	3 de junio 2032
	CLASIFICACION DE RIESGO:	III INVASIVO
	VIDA UTIL:	3 Años
	ALMACENAMIENTO	Almacenar un lugar seco alejado de la luz solar directa.

DATOS ESPECIFICOS DEL PRODUCTO:

COMPOSICION:	Gelatina y Plata Coloidal
USOS:	El tratamiento de cavidades quirúrgicas después de extracciones dentales.
CONTRAINDICACIONES:	Alergia a algún componente del producto.
PRECAUCIONES:	Si se impregna previamente con un líquido se reduce la capacidad de absorción de sangre de la esponja y por consiguiente el efecto hemostático. No se puede comprimir la esponja con anterioridad a su aplicación, dado que con la compresión se puede destruir la estructura de la esponja. Gracias a esta estructura se depositan las plaquetas y se activa la coagulación de la sangre.
MODO DE EMPLEO:	Gelatamp se suministra estéril y está preparado para su uso inmediato. El tamaño de la esponjita se puede adaptar a la cavidad de la herida con ayuda de unas tijeras o de un escalpelo y en grandes heridas se pueden emplear dos esponjitas. En estos casos hay que tener en cuenta que no se apriete la esponjita puesto que en caso contrario se destruiría su estructura y se anularía su capacidad de absorción de la sangre. Gelatamp se aplica inmediatamente después de que la cavidad de la herida se haya llenado de sangre. En esta cavidad se tiene que llenar por completo de sangre, es decir, no deben quedar zonas de la esponja sin humedecer puesto que éstas dificultarían el proceso de cicatrización y la completa absorción. Con el fin de no dañar la epitelización, la esponjita no debe sobresalir del borde interior de la encía. Con la colocación de la esponjita, los alveolos no requieren más cuidados por lo que no se debe continuar con los lavados y se puede cerrar mediante costura. Con la aplicación de Gelatamp no es necesario emplear desinfectantes.

APROBADO POR:	NOMBRE:	PATRICIA RESTREPO OCHOA
	CARGO:	DIRECTORA TECNICA