

ETCHANT GEL & ETCHANT GEL S & ETCHANT 15

Definición

Coltène® Etchant Gel, Etchant el S y Etchant 15 son geles grabadores utilizados para uso dental como un adhesivo.

Composición Coltène® Etchant Gel y Etchant Gel S

Ácido fosfórico 35%

Composición Coltène® Etchant 15

Ácido fosfórico 15%

Indicaciones

La cauterización del diente en la técnica de restauración adhesiva.

Contraindicaciones

Evitar el contacto con la gingiva o con los dientes contiguos.
En caso de alergia demostrada a los componentes.
En caso de una higiene pobre.

Efectos secundarios

El contacto con dentina vital durante un tiempo prolongado puede ocasionar dolores postoperatorios.

Interacciones con otros agentes

La contaminación con saliva del esmalte gravado y secado neutraliza el efecto adhesivo de los sistemas del adhesión.

Aplicación.

Como limpiar los dientes.

Se limpia el diente a tratar y sus limitrofes mesiales y distales con cepillo y una pasta sin fluoruro.

Mantenimiento en seco (Dique de caucho).

El trabajo en seco es condición básica para obtener resultados óptimos. Se recomienda usar dique de caucho.

Preparación de la cavidad.

Preparar la cavidad según los principios de restauración adhesiva.

Aplicación de Coltène® Etchant Gel S y Etchant 15

Limpiar y enjuagar minuciosamente la superficie del esmalte a grabar y a continuación secar bien la zona a grabar después de haber secado el campo de trabajo. Aplicar Etchant Gel. Tiempo de cauterización para Etchant Gel S: 15 s. Tiempo de cauterización para Etchant 15: 30 s. Tras el efecto, enjuagar con un chorro intenso de agua. Si en la superficie del esmalte aún quedarán restos de gel grabador, éstos se deben eliminar enjuagándolos nuevamente. El esmalte cauterizado presenta un aspecto blanco calcáreo y no debe ser contaminado antes de la aplicación del Bond. (después de un contacto con saliva volver a cauterizar, enjuagar y secar). El esmalte grabado que no esté tapado por el compuesto debe ser fluorado.



Para el control óptimo pre-sionar el émbolo de la jeringa con la palma de la mano.



Una dosificación precisa no se alcanza sujetando la jeringa de manera convencional con el pulgar sobre el émbolo.

Medidas a tomar en caso de emergencia, síntomas, contramedidas

Estos productos han sido concebidos para uso del dentista, quien decide sobre la forma de su uso y la duración, dependiendo de cada situación. Se pueden excluir por un peligro agudo al tragar por descuido, ya que no es tóxico. En caso de contacto directo con la mucosa bucal bastará con enjuagarse con agua. En caso de entrar en contacto con los ojos, se deben enjuagar con abundante agua durante 10-15 min y se debe consultar a un oftalmólogo para el diagnóstico el tratamiento posterior.

Propiedades toxicológicas

Estos productos no resultan tóxicos ni sensibilizantes cuando son utilizados en las dosis usuales.

Advertencias

A suministrar sólo a dentistas y laboratorios dentales o bajo su autorización.
¡Conservar fuera del alcance de los niños!
No utilizar el material una vez caducado.
Coltène® Etchant Gel y Etchant Gel S contiene 35% de ácido fosfórico.
R34 (origina quemaduras)
S26 (En caso de entrar en contacto con los ojos, se deben enjuagar a fondo con abundante agua durante 10-15 min y consultar a un oftalmólogo para el diagnóstico y el tratamiento posterior) Coltène® Etchant 15 contiene 15% de ácido fosfórico.

Conservación y caducidad

Estos productos deben ser almacenados a temperatura ambiente (aprox. 23°C / 73°F), para lo cual no deben someterse a la luz directa del sol u otras fuertes de calor.

Estos productos cumplen con la finalidad prevista hasta la fecha de caducidad, que viene indicada en los recipientes.

Marcado

La fecha de caducidad y el número de **LOT** pueden verse en los recipientes.

Fecha de publicación de esta información para el uso

Abril de 2010