

FICHA TECNICA

Nombre del Producto:	VOCO Profluorid Varnish
REF:	1267 (melón) 2233 (cereza)
Nombre Genérico:	Barniz dental con fluoruros (NaF al 5 %)



Datos Generales:

Presentación:	Tubo 10 ml
Fabricante:	VOCO GmbH con domicilio en Alemania
Importado por:	ULTRADENTAL S.A.S., con domicilio en Cota, Cundinamarca, Colombia
Registro Sanitario:	INVIMA 2024DM-0029008
Fecha Vencimiento del Registro Sanitario:	Junio 27 de 2034
Clasificación de Riesgo:	Ila
Tipo de Dispositivo:	Dispositivo invasivo
Código UDI-DI:	E221001600000000008E
Almacenamiento:	Leer las indicaciones en la etiqueta del producto

Datos Especificos del Producto:

Composición	• Fluoruro de Sodio (5%) • Colofonia • Sílice Pirógena • Etanol • Etilcelulosa • Xilitol • Sabores
Indicaciones de uso	• El tratamiento de dientes hipersensibles • El tratamiento de superficies radiculares sensibles Aclaración del Fabricante: VOCO Profluorid Varnish contiene fluoruro (fluoruro de sodio 5%) que permite fortalecer la superficie del esmalte dental y producir mayor resistencia a la caries, para controlar la desmineralización y formación de cavidades en el tejido dentario. VOCO Profluorid Varnish es un barniz de fluoruro para el tratamiento de superficies de esmalte y dentina. Es perfecto para una remineralización acelerada y la fluoración de la sustancia dental dura. Gracias a su matriz natural de colofonia, VOCO Profluorid Varnish se adhiere también a superficies húmedas y tolera restos de humedad y saliva. A la composición del barniz se le ha agregado xilitol, al que se le reconoce un efecto inhibidor de la formación de caries, además de mejorar el sabor.

Descripción del producto:	VOCO Profluorid Varnish es un barniz de fluoruro para la desensibilización dental para el tratamiento de superficies de esmalte y dentina. VOCO Profluorid Varnish se adhiere también a superficies húmedas y tolera restos de humedad y saliva. VOCO Profluorid Varnish es una suspensión etanólica de colofonia con aroma artificial y con la acción edulcorante del xilitol. 1 ml de VOCO Profluorid Varnish contiene 50 mg de fluoruro de sodio, que se corresponden con 22,6 mg de fluoruro.
Contraindicaciones:	• VOCO Profluorid Varnish contiene colofonia y aroma artificial. En caso de existir hipersensibilidad conocida (alergia) a estas sustancias, absténgase de aplicar VOCO Profluorid Varnish. • VOCO Profluorid Varnish no debe aplicarse en pacientes con gingivitis o estomatitis ulcerosa. • VOCO Profluorid Varnish no está indicado para un tratamiento sistémico.
Nota Importante:	Leer completamente las instrucciones de uso del producto para su adecuado uso.